



OS=NA MEDICAL

OnSteril

Disposable Protective Coverall Kombinezon Ochronny Jednorazowy

EN 340:2003

EN 14605:2005
+A1:2009

EN 14605:2005
+A1:2009



EN ISO 13982-1:2004
A1:2010

EN 13034:2005
A1:2009

EN 1073-2:2002

EN 1149-5:2008

EN 14126:2003
/AC:2004

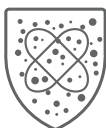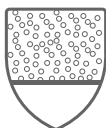

Category III
Type 3/4 - 5/6



.....



.....



.....

Fabric 60% Polipilene 40% Polietilene

SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL
CHEST	84-92 cm	92-100 cm	100-108 cm	108-116 cm	116-124 cm	124-132 cm
HEIGHT	162-170 cm	168-176 cm	174-182 cm	180-188 cm	186-194 cm	192-200 cm



Made in



Discover the potential




8694402344842

Model : MMK-34





Przed rozpoczęciem zakładania kombinezону należy sprawdzić czy zgodnie ze znakowaniem zamieszczonym na opakowaniu lub etykiecie kombinezону jego rozmiar jest prawidłowo dobrany do sylwetki.

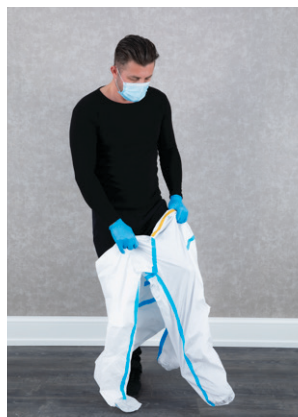

Zakładanie pełnego zestawu środków ochrony indywidualnej należy rozpocząć od nakożenia kombinezону.




Po założeniu kombinezону należy dopiąć zapięcie na wysokość poniżej szyi.

Get Dressed


Undress



Następnie należy rozpiąć maksymalnie do dotu zapięcie główne uważając aby zewnętrzna powierzchnia kombinezону nie dotykała odzieży spodniej.

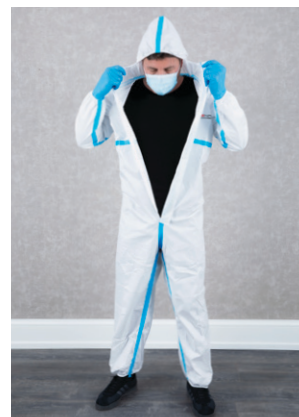

Należy rozchylić górną część kombinezону wzdłuż zapięcia głównego. Pochylając głowę w dół uchwytyć oburącz za zewnętrzną stronę kaptura na wysokości oczu i delikatnie, maksymalnie rozchylić kaptur uważając aby nie dotykać twarzy.

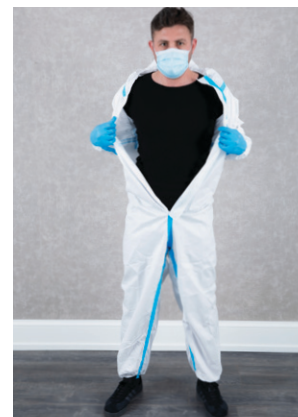

Następnie należy oburącz zdjąć kaptur i opuścić górną część kombinezону na ramiona wywijając go zewnętrzną stroną do spodu.



Kaptur kombinezону należy założyć dopiero po założeniu środków ochrony dróg oddechowych i jeśli są: okularów lub gogli ochronnych.



Po założeniu kaptura należy dopiąć zapięcie kombinezону maksymalnie pod szyję.



Po całkowitym zapięciu kombinezону należy uszczelnić listwą zakrywającą zapięcie poprzez dołączenie taśmy samoprzylepnej lub docisnięcie taśm samoszczepnych (tzw. rzepów) zamocowanych na spodniej powierzchni listwy. Na kaptur kombinezону należy założyć osłonę twarzy i wyregulować więzbę dopasowując ją do obwodu głowy.

Get Dressed


Undress



Przełożyć ręce w dół i do tyłu a następnie zdjąć jeden rękaw kombinezону. Następnie drugą ręką zdjąć drugi rękaw. Podczas zdejmowania kombinezону należy chwycić za jego wierzchnią część i należy zwrócić szczególną uwagę, aby wierzchnia część kombinezону nie dotknęła ciała ani odzieży spodniej.



Następnie wywijając kombinezon zewnętrzną stroną do spodu należy oburącz ściągnąć z nóg aż do podłoża.

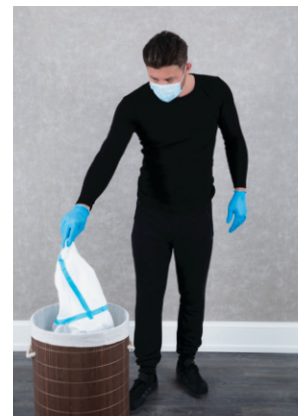

Zużyte rękawice należy umieścić w specjalnym pojemniku lub worku foliowym.

LIMITATIONS OF USE: Care should be taken when removing the dirty or liquid exposed suit, and contact with hazardous materials should be prevented. It is designed for extremely dangerous conditions and toxic chemicals. Overall seams may not protect against infectious materials. The final decision and responsibility for any application protection of the Type 3-B/4-B overalls is in the user. If the overalls are used with other Personal Protectors; cuffs must be attached to gloves, wrists boots and respirator (mask) beforehand. The suitability of this combination is at the discretion of the user. The static electricity that is formed in the body must be grounded properly. When grounding, the resistance on the person must be less than 108 ohms. These conditions can be easily created by wearing suitable shoes. The usage time of the product and the effect of the working environment on the comfort of use should be planned in advance.

Fabric 60% Polipropilene 40% Polietylene



It is not washed



It is not dried in the drying machine



Dry cleaning is not performed



It is not ironed



Hypochlorite is not used.



PP

Fabric 60% Polipropilene 40% Polietilene



It is not washed



It is not dried in the
drying machine



Dry cleaning
is not performed



It is not ironed



Hypochlorite
is not used.



PP